



B. Braun Space®

Infusionstherapie auf höchstem Niveau.

Ein verlässlicher Partner

Jahrzehntelange Erfahrung in der automatisierten Infusionstherapie.

Infusionspumpen und -systeme zählen seit jeher zum Kerngeschäft von B. Braun. Mit unseren innovativen Produkten, Lösungen und

Dienstleistungen helfen wir, die Infusionstherapie und Prozesse in der medizinischen Versorgung sicher und effizienter zu gestalten.




Expertise in der Entwicklung und Herstellung von Infusionstechnik. Seit 1951.

Seit 1951 sind wir Entwicklungstreiber im Bereich der Pumpentechnik und setzen Standards für die Infusionstherapie.



Bewährter Partner für alle Arten von Krankenhäusern.

Ob Kliniken der Grundversorgung, Spezialklinik oder Maximalversorger, unsere Infusionstechnik bietet für jeden Bedarf eine passende Lösung.

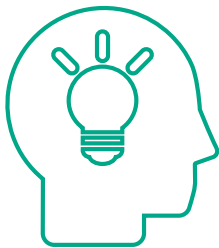

Produktion und Entwicklung in Deutschland.

In unserem Center of Excellence für Infusionstechnik sind Produktion, Forschung und Zulassung zusammengefasst. Unser über die Jahrzehnte gesammeltes Wissen und der fortlaufende Dialog mit unseren Kunden sowie unsere Erfahrung zu Prozessen und Abläufen stellen sicher, effiziente und innovative Lösungen zu entwickeln.




Mehr als 1 Million Space® Pumpen produziert.

Unsere Gerätegeneration Space® überzeugt Kunden auf der ganzen Welt. Dank der kontinuierlichen Weiterentwicklung und großen Therapievelfalt bietet Space® Lösungen für bestehende und zukünftige Anforderungen.




Expertise in der Vernetzung und IT-Anbindung seit 2001.

Bei der Anbindung und Vernetzung unserer Infusionstechnik partizipieren Sie von der Expertise unserer Spezialisten und erhalten gezielt Erfahrung und Wissen aus einer Hand.

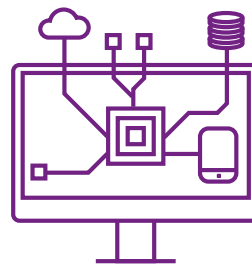


Verlässlich angebunden an verschiedene PDM-Systeme.

Mit Space® bieten wir Ihnen ein System, das seit Jahren über eine Vielzahl erfolgreicher und bestehender Anbindungen an PDM-Systeme verfügt.

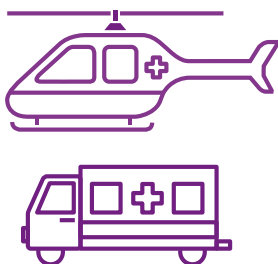

Verlässliche Nutzung zu Land und in der Luft.

Die Generation Space® ist sowohl als Einzelpumpe als auch in der SpaceStation EN 1789 und EN 13781-1 konform.

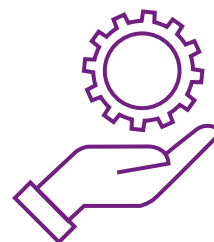

Eigener technischer Service mit einer Vielzahl an regionalen Stütz- punkten in ganz Deutschland.

Für die Instandhaltung unserer Infusionstechnik steht Ihnen unser Technischer Service mit Rat und Tat zur Seite. Dabei entscheiden Sie über den Umfang der Dienstleistung, die wir für Sie erbringen.

B. Braun Space®

Eine Generation mit System.

Spritzenpumpe Perfusor® Space




Unsere Spritzenpumpe bietet Ihnen hochpräzise Anlauf- und Fördereigenschaften und einen einzigartigen Sicherheitsmechanismus beim Spritzenwechsel.




Das Ordnungssystem SpaceStation + SpaceCom

Mit der SpaceStation bieten wir ein absolut modulares System, das sich ganz nach Ihren Wünschen skalieren lässt. Mit oder ohne Netzwerkanbindung.

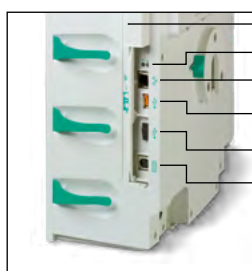

- Wireless LAN (optional)
- Statusanzeigen für SpaceCom
- Ethernet RJ45
- USB für BarcodeReader
- USB
- RS232

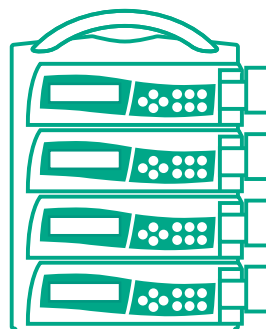

Volumetrische Pumpe Infusomat® Space



Unsere kleine volumetrische Pumpe verhindert Free-Flow gleich doppelt, durch einen Mechanismus in der Pumpe und an der Leitung. Für einen sicheren Infusionssystem-Wechsel.

B. Braun OnlineSuite zur Vernetzung mit dem Krankenhaus-Netzwerk

Verschiedene Anwendungen der B. Braun OnlineSuite unterstützen Sie dabei, Ihre Prozesse rund um die Infusionstherapie bestmöglich zu organisieren und das Arbeiten mit und um die Infusionspumpen zu erleichtern.



Die Generation Space®

Bewährter Standard in der Infusionstherapie.




Entwickelt für Präzision und Sicherheit bei der Anwendung

- Kolbenbremse beim Perfusor® Space und Free-Flow-Klemmen beim Infusomat® Space verhindern ungewollte Medikamentengaben
- Automatische, exakt koordinierte Abläufe bieten Schutz vor Handlingsfehlern und fördern exzellente Anlaufeigenschaften
- Individuell konfigurierbare Medikamentendatenbanken bieten Sicherheit bei der Arzneimittelapplikation



Spritzenhalter mit integrierter Kolbenbremse

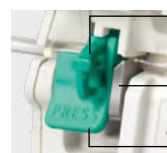

Anti-Free-Flow-Klemme der Leitung

Anti-Free-Flow-Klemme der Pumpe

Entnahme-Mechanismus

Entworfen mit dem Fokus auf das Wesentliche

- Kleinste Abmessung und sehr niedriges Gewicht
- Einfache Handhabung
- Identische Bedienung und Menüführung beider Pumpen



Gebaut für größtmögliche Flexibilität

- Nutzung als Einzelpumpe, im Verbund mit bis zu 3 Pumpen oder in Verbindung mit der SpaceStation für komplexe Bettplatzkonfigurationen
- Leichtes Ver- und Entriegeln der Pumpen
- Vertikale oder horizontale Befestigung an Rundrohr- oder Schienensystemen



Gemacht für effiziente Arbeitsabläufe und schlanke Workflows

- Leistungsfähiger Akku für einen netzunabhängigen Betrieb
- Schnell zu einer mobilen Einheit kombiniert
- Mit Funktionalitäten wie Barcoding und Auto-Programmierung
- Programmierung von Therapie-Profilen möglich
- Dank WLAN-Akku schnell zu einer WIFI-Pumpe umgerüstet





Komplexe Infusionstherapie

Leicht gemacht.

Designed für eine bestmögliche Bettplatzergonomie

- Schneller und werkzeugfreier Zusammenbau von SpaceStation
- Nach Bedarf skalierbar auf bis zu 24 Pumpen, verteilt auf bis zu 6 Stations; in 1, 2 oder 3 Säulen nebeneinander
- Beliebige Bestückung mit Infusionspumpen
- Mit nur einer Stromversorgung für das gesamte System
- Mit zentralisierter Alarmfunktion über das SpaceCover comfort
- Anbindungsfähig über eine einzige Datenschnittstelle SpaceCom

Programmiert für größtmögliche Therapievelfalt


- Umfangreiche Einsatzmöglichkeiten für verschiedenste IV-Therapien sowie die enterale Ernährung
- Vielfältige Therapiefunktionalitäten wie TIVA, TCI, PCA-PCEA, TOM, Bolustokolyse, Barcoding oder Auto-Programming
- Verschiedene Therapiemodi wie Intervallbolus, Anflutfunktion
- Umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten bei der Nutzung von Medikamentendatenbanken

Konzipiert zur kontinuierlichen Erhöhung der Patientensicherheit

- Vermeidung von Medikationsfehlern durch DoseGuard (Soft- und Hardlimits)
- Mit therapiespezifischen Einmalartikeln zur Minimierung der Verwechselungsgefahr und Erhöhung der Anwendersicherheit (AirStop/PrimeStop/ENFit™/NRFit™/Cyto-Set®)
- Bestmöglich aufeinander abgestimmte Einmalartikel, für größtmögliche Applikationsgenauigkeit und kontinuierliche Medikamentengabe
- Integration von technischen Lösungen zur Unterstützung der Therapieüberwachung (Up-Stream-Sensor/Occluguard/ skalierbarer Abschalt Druck) und Sicherheit bei der Arzneimittelapplikation

Ausgelegt für IT Anbindungen


- Einfache IT-Anbindungsmöglichkeit
- Nachgewiesene Anbindung an verschiedenste PDM-Systeme
- Schnelle und zentralisierte Ansicht aller Infusionspumpen auf Station über die Alarmmanagement-Funktion der OnlineSuite
- Schnelle Update und Upgrade Möglichkeiten durch zentralisiertes Aufspielen der Daten (Upload)
- Mit kontinuierlicher Entwicklung hinsichtlich neuer IT-Vorgaben zur Cyber-Security

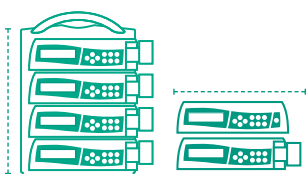

BESTMÖGLICHE
BETTPLATZERGONOMIE



GRÖSSTMÖGLICHE
THERAPIEVIELFALT

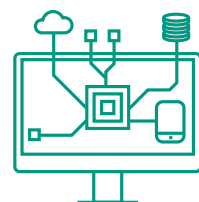

AUSGELEGT FÜR
IT-ANBINDUNGEN

Enterale und Parenterale Ernährung

Beides über eine Space®-Pumpe möglich.

Enterale Ernährung ist mit jeder Pumpe möglich


- Die Zweckbestimmung eines jeden Infusomat® und Perfusor® Space umfasst die enterale und parenterale Ernährung
- Einfache Integration der enteralen Ernährungsdaten ins PDMS
- Kennzeichnung der Pumpen über spezielle Aufkleber möglich

Breites Portfolio für eine gesamthafte Therapie

- Umfassendes Einmalartikel-Angebot von der Infusomat®-Space-Leitung bis hin zur enteralen Spritze und Perfusor®-Leitung
- Farb-Codierung aller Einmalartikel und Umsetzung des ENFit™-Standards, um Verwechslungsrisiken zu vermeiden
- Breites Angebot über enterale und parenterale Ernährungslösungen

Infusionspumpen-Programmierung für einen optimalen Therapieaufbau


- Hinterlegung spezifischer Profile ermöglicht die automatische Abarbeitung durch die Infusionspumpe mit frei programmierbaren Aufbau-, Plateau- und Ausschleichphasen.

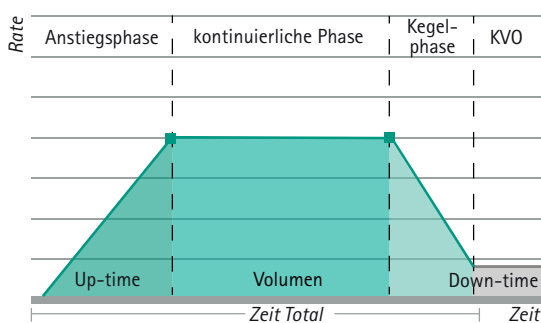

(Ramp & Taper z.B. für parenterale Ernährung)

Space® Glucose Control zur Unterstützung der klinischen Ernährungstherapie


- Unterstützungsfunktion zur Blutzucker-Kontrolle und automatisierten Insulin-Gabe unter Berücksichtigung der parenteralen und enteralen Ernährungsparameter
- Selbstlernender Algorithmus
- Nachgewiesene und verlässliche Etablierung eines Blutzuckerwertes im normoglykämischen Bereich

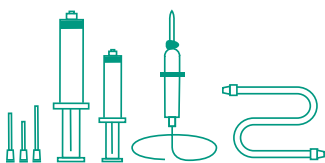

BREITES PORTFOLIO
AN EINMALARTIKELN



BEREIT FÜR
ENTERALE ERNÄHRUNG

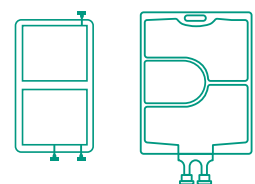


ERNÄHRUNGSTHERAPIE
MIT SG



TIVA und TCI

Mit Space® kein Problem.

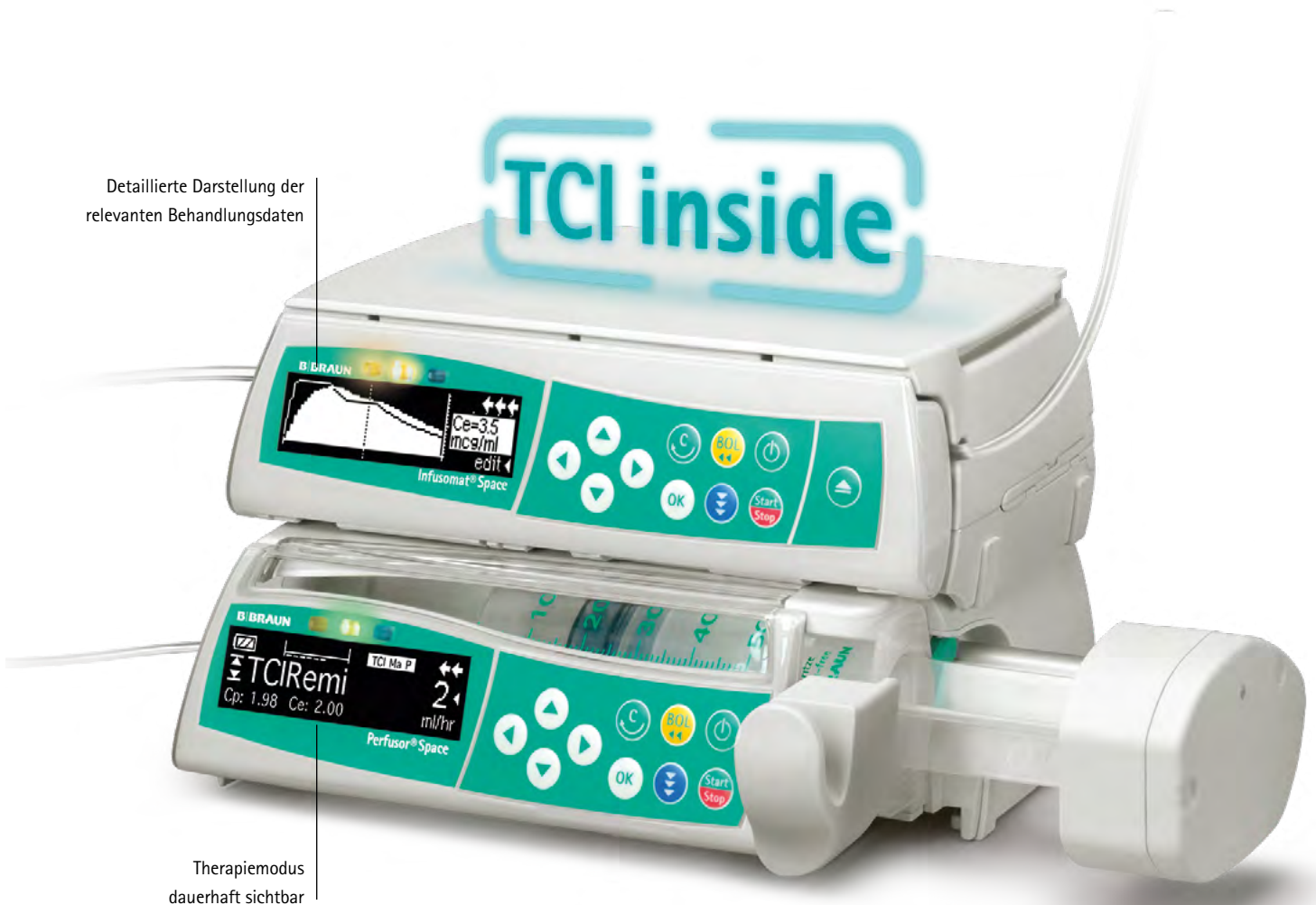

Alle TCI-relevanten Daten auf einen Blick

- Begrenzung der Plasmakonzentration
- Anzeige der Aufwachzeit
- Elektronische Anästhesiedokumentation ohne zusätzlichen Gerätebedarf

Name der aktuellen
Medikation

Modus-Indikator:
TCI, Modus, Model



Aktuelle Plasma- und
Effekt-Konzentration

Ziel und Einheit

Total Intravenöse Anästhesie mit Space® leicht gemacht



- Das Space® System ermöglicht ein abgestimmtes Vorgehen bei TIVA
- Standardisierte TIVA Komplettsysteme unterstützen den Gesamtprozess
- Die Space® Pumpen können für eine manuell oder systemgesteuerte Anästhesie genutzt werden

TCI – Funktionalität in jedem Infusomat® oder Perfusor® vorhanden

- Die Zweckbestimmung eines jeden Infusomat® und Perfusor® Space umfasst die TCI
- Mit TCI können moderne Anästhesie-Konzepte gefahren werden, die eine systemgesteuerte Einleitung, Aufrechterhaltung und Aufwachphase der Narkose unterstützen.
- Aktivierung der Funktionalität durch Freischaltung
- Kennzeichnung der Pumpen über spezielle Aufkleber möglich




Angepasste Therapien dank verschiedener Modelle

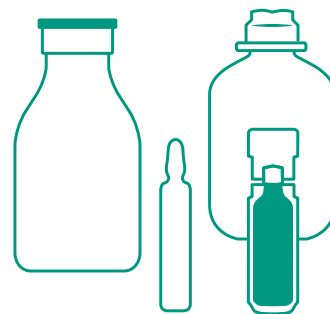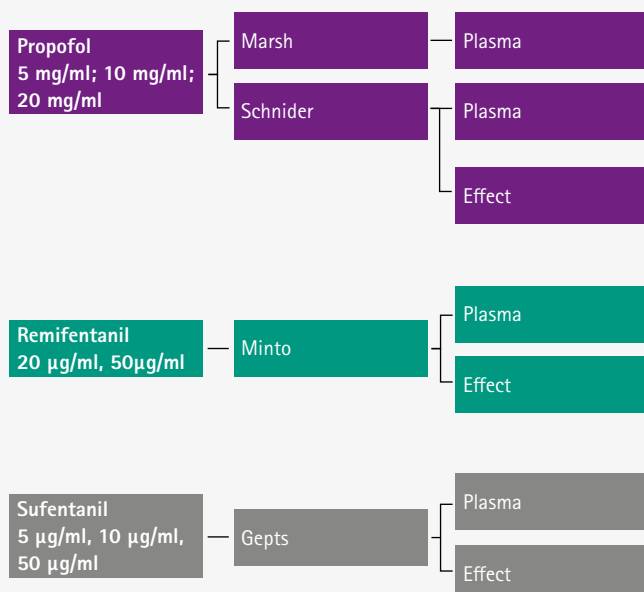

Flexibilität in der Schmerztherapie

Dank der PCA Funktion von Space®.

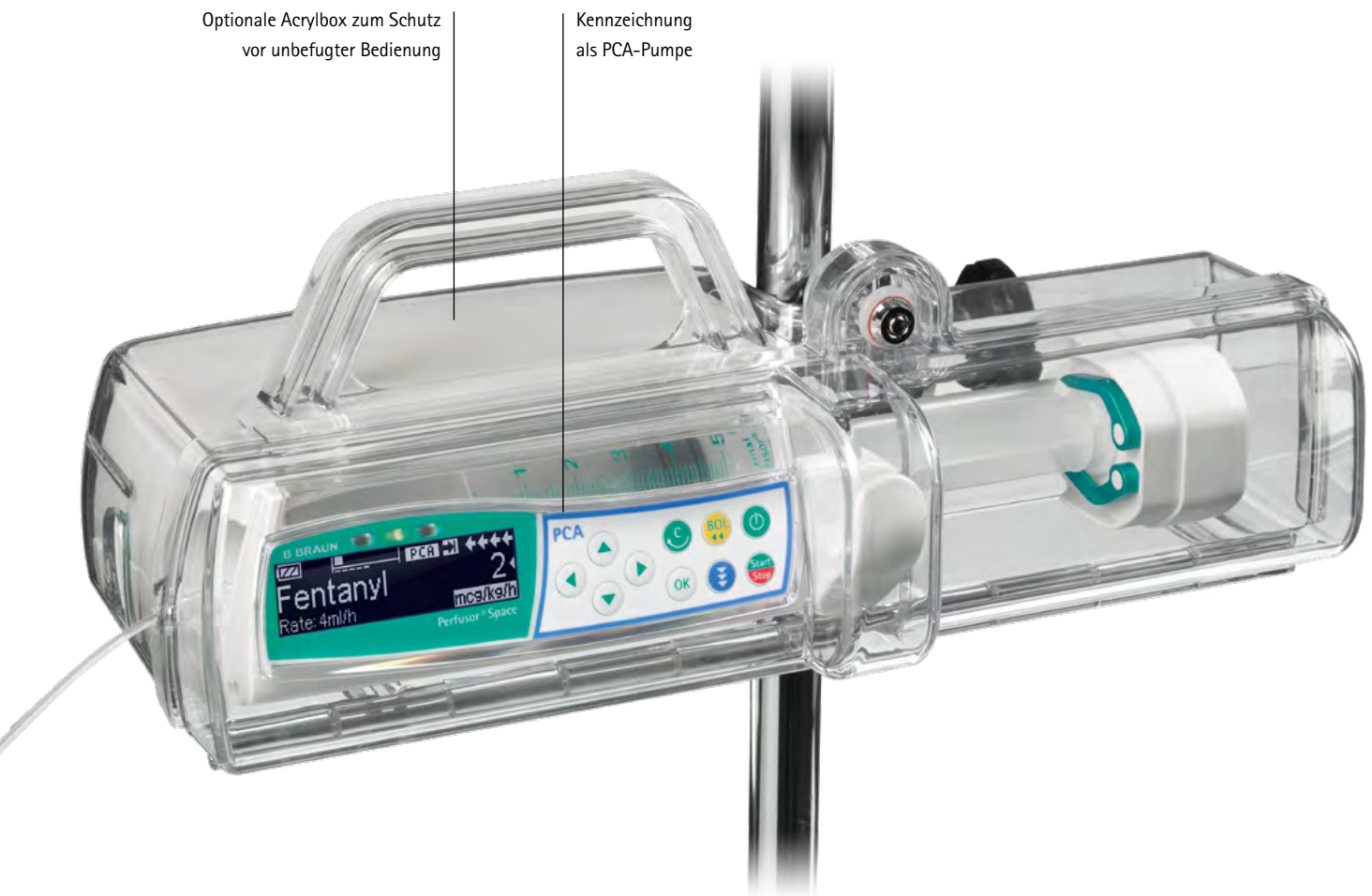

Optionale Acrylbox zum Schutz
vor unbefugter Bedienung

Kennzeichnung
als PCA-Pumpe

Sicherheit und Handling immer im Blick


- Verschiedene PCA Profile konfigurierbar
- Vielfältige Einstellmöglichkeiten über die Medikamenten-datenbank
- Maximale Bolusrate bei 1800 ml/h
- Uneingeschränkter Zugang zur PCA Historie und dem applizierten Volumen
- 7 Tage Logfile für eine Überwachung der Therapie-entwicklung im Zeitverlauf

Schmerztherapie mit jedem Infusomat® oder Perfusor® möglich


- Die Zweckbestimmung eines jeden Infusomat® oder Perfusor® Space umfasst die PC(E)A bzw. PCA
- Jede Space® Pumpe kann mittels PCA-Taster zu einer Schmerzpumpe umfunktioniert werden
- Begrenzung der Schmerztherapie erfolgt über die Medikamentendatenbanken
- Spezielle Zugangs-codes ermöglichen den beschränkten Zugriff für definierte Anwendergruppen
- Verschiedenes Sicherheitszubehör bietet Schutz vor unbeabsichtigten Handlungen an den Pumpen
- Kennzeichnung der Pumpen über spezielle Aufkleber möglich



PCA-Kit

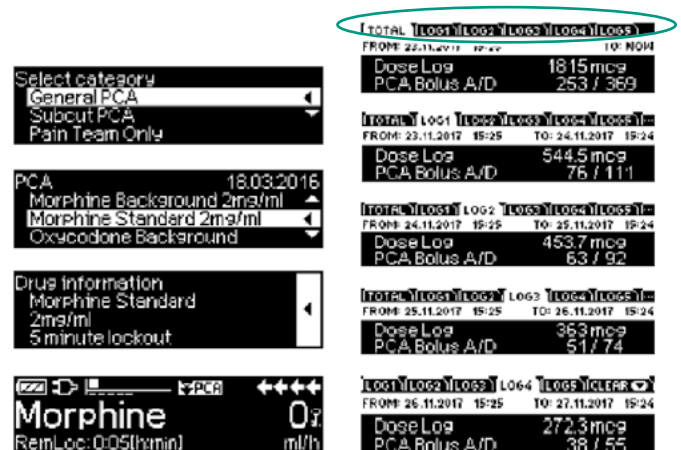

Patientenkontrollierte Analgesie

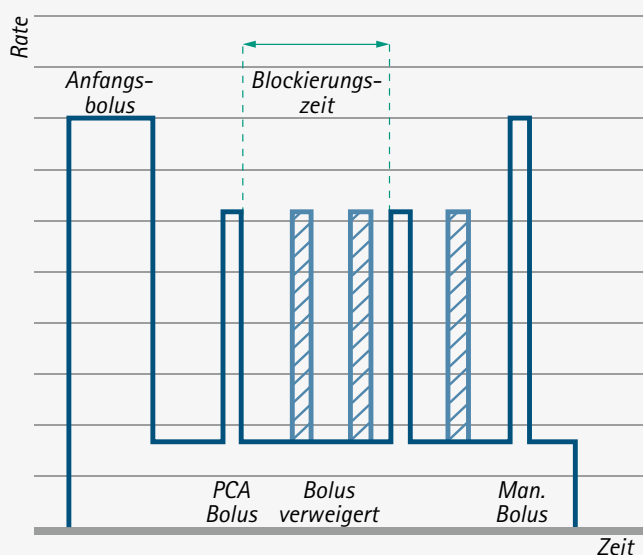



Infusionstherapie im MR-Bereich



Mit der SpaceStation MRI.

Dank der SpaceStation MRI ist der Einsatz von Space® Infusionspumpen fast uneingeschränkt in MRT Umgebung möglich

- Speziell abgeschirmte SpaceStation auf einem Transportwagen
- Für den Einsatz in MRT Umgebung von bis zu 3 Tesla
- Sicherer Betrieb dank integriertem Magnetfeldindikator
- Für bis zu 4 Infusionspumpen der Generation Space®
- Ermöglicht die Nutzung der bereits verwendeten Standard-Einmalartikel für die Space® Infusionspumpen

Sichere und einfache Navigation der SpaceStation MRI durch den integrierten Magnetfeldindikator

- Kontinuierliche Überwachung der magnetischen Feldstärke
- Optischer und akustischer Alarm bei Überschreitung der maximal zulässigen magnetischen Feldstärke
- Dauerhafter Batteriebetrieb
- Speicherung der Messwerte bei Überschreitung der maximal zulässigen Feldstärke

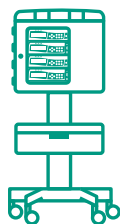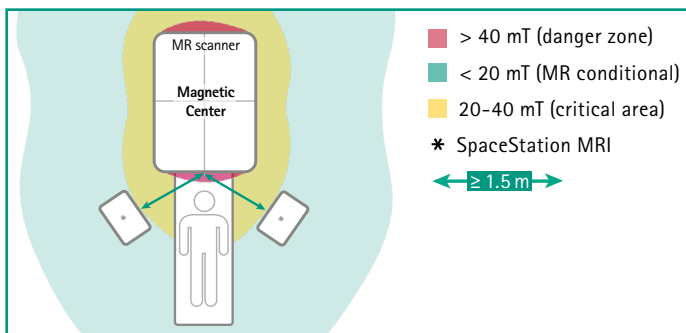

INFUSIONSTHERAPIE
IM MR-BEREICH



MAGNETFELDINDIKATOR
MIT AMPELFUNKTION

Präzision mit Space®


Besonders für die ganz kleinen Patienten.

Umfassendes Zubehör für eine abgestimmte Therapie

- Umfangreiches Sortiment an Einmalartikeln
- PVC- und DEHP-freie Materialien
- Minimales Restvolumen von Leitungen und Zusatzkomponenten
- Nadelfreie Verbindungsstücke
- Omnifix® Spritzen in kleinen Größen für optimales Anlaufverhalten und kurze Alarmzeiten

In der Pädiatrie stellt die präzise Verabreichung von Medikamenten eine der wichtigsten Anforderungen an ein System dar

- Perfusor® Space ist mit Spritzengrößen ab 2/3 ml betreibbar
- Der Ratenbereich reicht von 0,01 ml/h – 1.800 ml/h
- Die Mechanik der Pumpe ist auf eine höchst präzise Applikation in Abhängigkeit der verwendeten Spritze ausgelegt
- Die Kolbenbremse und die vollautomatische Spritzenfixierung des Perfusor® Space erhöhen die Sicherheit der Medikamentengabe
- SpaceOccluguard dient der intelligenten Drucküberwachung und Okklusionserkennung

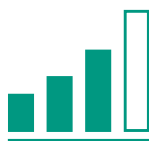

ZUSÄTZLICH AKTIVIER-
BARE DRUCKSTUFEN



SPEZIELLE EINMALARTIKEL
FÜR DIE PÄDIATRIE





Sicherheit mit Space®

Bei der Therapie onkologischer Patienten.

Zukunftssicher

- DoseGuard – Dose Error Reduction Software
- Auto programming
- Barcoding
- Drahtlose Konnektivität


Patientenerfahrung

- Klein und leicht
- Leiser Betrieb
- Keine unnötige Unterbrechung der Therapie
- Lange Batterielebensdauer



Im sensiblen Umfeld der Onkologie gelten besondere Anforderungen an die sichere Zubereitung und Applikation von Zytostatika

- Cyto® Set ist ein nadel freies, geschlossenes System
- Es dient der sicheren Zubereitung, Applikation und Entsorgung
- Verwendung von PVC-/DEHP-freien Neutrapur®-Leitungen
- Verschiedenste Varianten auch mit Lichtschutz erhältlich
- Für ein minimiertes Kontaminationsrisiko

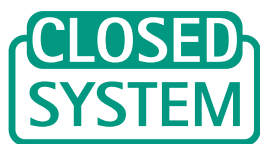

GESCHLOSSENES
SYSTEM




PVC/DEHP-FREIE
NEUTRAPUR-LEITUNGEN



TakeOverMode - wenn es auf eine unterbrechungsfreie Applikation ankommt

- TakeOverMode (TOM) in jedem Perfusor® Space aktivierbar
- Ermöglicht einen unterbrechungsfreien Übergang der Applikation von einer Pumpe auf die nächste
- Reduziert das Risiko ungewollter Unterförderung, insbesondere bei hochpotenten Arzneimitteln
- Automatisierte Datenübertragung erlaubt den Fokus auf andere Tätigkeiten

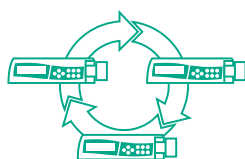

UNTERSTÜTZT
TAKEOVERMODE



Perfusor® Space – auch für die Bolustokolyse zugelassen

- Unterstützt eine seit über 20 Jahren etablierte Therapie in der Geburtshilfe
- Bietet vielfältige Vorteile durch eine systemgestützte Tokolyse
- Mit 3 verschiedenen Bolusgrößen
- Effektiv und gut steuerbar



UNTERSTÜTZT
BOLUSTOKOLYSE

Willkommen bei der OnlineSuite



OneView



DrugLibrary Manager
Space



DrugLibrary Manager
compact plus



Device Manager



Upload Manager



DoseTrac

Funktionen


B. Braun OnlineSuite

Für ein effizientes Infusionsmanagement.



Drug Library Manager

- Zentrale Verwaltung der Medikamentendaten
- Eine Master-Datenbank für alle Infusionspumpen
- Stations-spezifische Medikamentendatenbanken

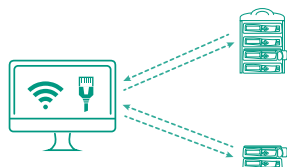


Upload Manager

- Zur Sicherstellung stets aktueller Medikamentendatenbanken
- Zeit- und Ressourcenoptimierung für alle involvierten Parteien
- Aktualisierungsmöglichkeit ohne Unterbrechung laufender Therapien



DoseTrac

- Generierung von Berichten und Übersichten über verabreichte Medikationen
- Ermöglicht eine Analyse und Optimierung des Medikationsprozesses

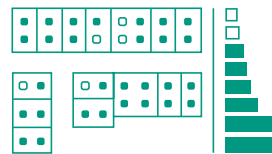


OneView

- Zentralisierte Darstellung aller pumpengesteuerten Therapien
- Echtzeitinformation über alle laufenden Infusionspumpen
- Alarm-Monitoring und Priorisierung



Device Manager

- Informationen zu den Sicherheitstechnischen Kontrollen
- Überblick über den aktuellen Softwarestand aller Infusionspumpen
- Ortung der Infusionspumpen im Krankenhaus
- Informationen zu den jeweils enthaltenen Medikamenten-Datenbanken

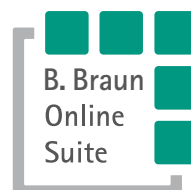

Technischer Service

Profitieren Sie von unserem Wissen als Hersteller.

Service-Exzellenz, auf die Sie sich verlassen können

- Schnell erreichbar dank zentraler Leitstelle, eigene Servicewerkstatt am Produktionsstandort, regionale Service-Stützpunkte und Servicepartner
- Zuverlässige und hochwertige Auftragsbearbeitung dank spezialisierter Servicetechniker


Breites Angebot

- Technischer Support
- Ersatzteil-Management
- Serviceleistungen
- Training, Aus- und Weiterbildung


Full-Service	Reparatur/Rundumschutz	Service "on Demand"	IT Support für die B. Braun OnlineSuite
Sicherheitstechnische Kontrolle (STK)	Instandsetzungs-/ Reparaturpauschalen	Instandsetzung	Basis Support (bis zu 15 Stunden p.a.)
Instandsetzung/Reparatur	Gewalt/Sturzschäden	Sicherheitstechnische Kontrolle (STK)	Standard Support (bis zu 30 Stunden p.a.)
Gewalt/Sturzschäden	Akku	Software- & Systempflege	Premium Support
Akku	Geräteabholung & Transport		
Geräteabholung & Transport			
Terminüberwachung			




VERSCHIEDENE
SERVICEOPTIONEN

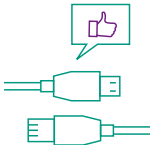

OPTIONALER
IT-SUPPORT

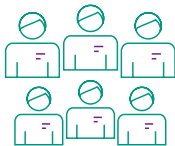

GESCHULTE
SERVICETECHNIKER

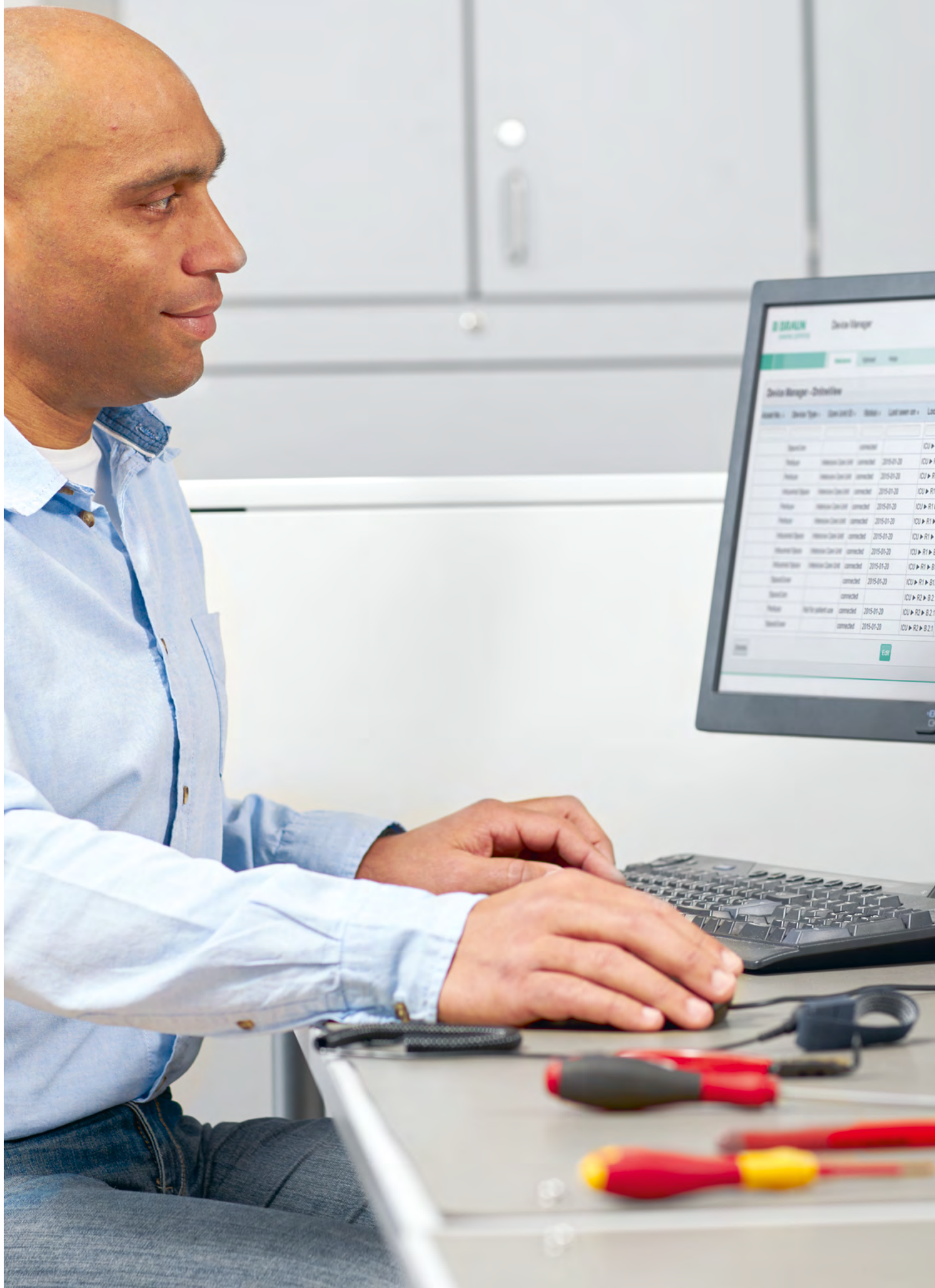

Device Manager


Device Manager - Overview

Device Name	Device Type	Device ID	Status	Last seen on	Location
Pulse	Medical Device	connected	2015-01-20	ICU	R1
Pulse	Medical Device	connected	2015-01-20	ICU	R1
Respirator	Medical Device	connected	2015-01-20	ICU	R1
Pulse	Medical Device	connected	2015-01-20	ICU	R1
Pulse	Medical Device	connected	2015-01-20	ICU	R1
Respirator	Medical Device	connected	2015-01-20	ICU	R1
Pulse	Medical Device	connected	2015-01-20	ICU	R1
Respirator	Medical Device	connected	2015-01-20	ICU	R1
Device Name	connected	2015-01-20	ICU	R1	B1
Device Name	connected	2015-01-20	ICU	R1	B2
Pulse	Medical Device	connected	2015-01-20	ICU	R2
Device Name	connected	2015-01-20	ICU	R2	B2

Technische Daten


Infusomat® Space

Gerätetyp	Volumetrische Infusionspumpe
Größe	214 x 68 x 124 mm (B x H x T)
Gewicht	Ca. 1,4 kg
Feuchtigkeitsschutz	IP 22
Display	Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, ~40° Lesewinkel von allen Seiten
Bedienung	Hintergrundbeleuchtete Tasten, Cursor Navigation
Förderratengenaugigkeit	<< ±0,5 % mechanische Genauigkeit ±5 % gemäß IEC/EN 60601-2-24
Externe Kleinspannung	11-16 V DC mit externem 12 V-Steckernetzteil oder mit SpaceStation
Akkulaufzeit	Minimaler Batterieverbrauch der Geräte und NiMH Batterie bieten lange Betriebsdauer, z. B. 13 Std. bei 100 ml/h; 16 Std. bei 25 ml/h

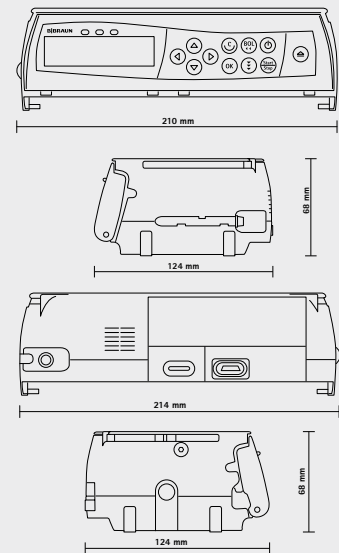

Perfusor® Space

Gerätetyp	Spritzenpumpe
Größe	249 x 68 x 152 mm (B x H x T), Kolben eingefahren
Gewicht	Ca. 1,4 kg
Feuchtigkeitsschutz	IP 22
Display	Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung, ~40° Lesewinkel von allen Seiten
Bedienung	Hintergrundbeleuchtete Tasten, Cursor Navigation
Förderratengenaugigkeit	<< ±0,5 % mechanische Genauigkeit ±2 % gemäß IEC/EN 60601-2-24
Externe Kleinspannung	11-16 V DC mit externem 12 V-Steckernetzteil oder mit SpaceStation
Akkulaufzeit	Minimaler Batterieverbrauch der Geräte und NiMH Batterie bieten lange Betriebsdauer, z. B. 19 Std. bei 5 ml/h; 10 Std. bei 25 ml/h

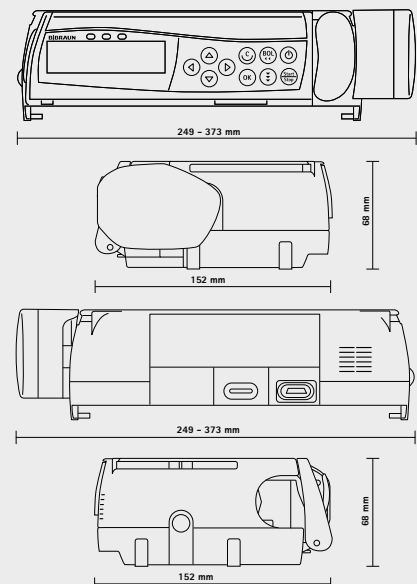

Perfusor® Space		Infusomat® Space
Produktspezifikationen		
Gerätetyp	Spritzenpumpe	Volumetrische Infusionspumpe
Klassifikation	 defibrillationsgeschützt, Typ CF,  Schutzklasse II gemäß IEC/EN 60601-1 Klasse IIb gemäß Richtlinie 93/42/EWG	
Feuchteschutz	IP 22 (tropfwassergeschützt bei waagerechter Gebrauchslage)	
EMV	IEC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-24	
Betriebs- bedingungen	+5 ... + 40 °C	+10 ... + 40 °C
	Relative Luftfeuchte: 30 % ... 90 % (ohne Betauung), Atm. Luftdruck: 500 ... 1060 mbar	
Größe; Gewicht	(BxHxT) 249x68x152 mm, Antrieb in Parkposition; ca. 1,4 kg	(BxHxT) 214x68x124 mm; ca. 1,4 kg
Leistungsdaten		
Zugelassene Einmalartikel	Spritzentypen: B. Braun Perfusor®/Omnifix®; B-D, Terumo, Monoject und weitere Größen: 2/3; 5; 10; 20; 30; 50/60 ml	Infusomat® Space-Leitung
Förderraten- bereich	0,01 - 999,9 ml/h	0,1 - 1200 ml/h
	0,01 - 99,99 ml/h in 0,01 ml/h-Schritten 100,0 - 999,9 ml/h in 0,1 ml/h-Schritten	0,1 - 99,99 ml/h in 0,01 ml/h-Schritten 100,0 - 999,9 ml/h in 0,1 ml/h-Schritten 1000 - 1200 ml/h in 1 ml/h-Schritten
	Online-Ratenverstellung ohne Infusionsunterbrechung	
Bolusgabe	1 - 1800 ml/h;	0,1 - 1200 ml/h
	- Bolus auf Anforderung - Bolus mit Volumen-Dosierungs-Vorwahl - Bolus mit Zeitvorwahl (1 min - 24h)	
Volumenvorwahl	0,1 - 9999 ml	0,1 - 99999 ml
	0,1 - 99,99 ml in 0,01 ml-Schritten	0,1 - 99,99 ml in 0,01 ml-Schritten
	100,0 - 999,9 ml in 0,1 ml-Schritten	100,0 - 999,9 ml in 0,1 ml-Schritten
	1000 - 9999 ml in 1 ml-Schritten	1000 - 99999 ml in 1 ml-Schritten
Zeitvorwahl	1 min - 99 h 59 min	
Ratenberechnung	Automatische Ratenberechnung per Volumen-/Zeitkalkulation oder Dosiskalkulation	


Technische Daten

Perfusor® Space		Infusomat® Space
Leistungsdaten		
Dosiskalkulation	Automatische Berechnung der Förderrate basierend auf der Dosiseingabe in ng, µg, mg, mmol, IE gewichts- und /oder zeitbezogen (z.B. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h), ng und / oder Körperoberfläche Bolusapplikation in mg, µg, IE, mmol pro kg und /oder pro Zeiteinheit (min) mit automatischer Berechnung der Bolusrate für eine Bolusgabe	
KVO-Rate	Standard-Einstellungen: - Rate ≥ 10 ml/h: KVO-Rate 3 ml/h - Rate < 10 ml/h: KVO-Rate 1 ml/h - Rate < 1 ml/h: KVO-Rate = eingestellte Rate Kundenspezifische Konfiguration oder Deaktivierung der KVO-Raten möglich	
Standby (Pause)-Modus	Durch Drücken einer Taste auswählbar (kurz EIN/AUS-Taste) Standby-Zeit einstellbar von 1 min bis zu 24 h in 1 min-Stufen	
Medikamenten-datenbank	Medikamentenauswahl im Start-Menü oder über Optionen - 1500 Medikamente einschließlich aller Parameter in der Medikamentendatenbank - bis zu 30 durch den Anwender definierte Medikamentenkategorien - Vermeidung von Fehldosierungen durch medikamentenbezogene Dosislimits in der Medikamentendatenbank	
Piggyback-Infusion		Piggyback-Modus zur wechselweisen Verabreichung von zwei Infusionen - Eingabe von 2 unterschiedlichen Förderraten - Balancierung pro Infusion (2-fach) - Wechsel zwischen Infusion 1 und 2
Infusionsprofile/Therapie-Modi	Kontinuierliche Infusion, Piggyback, Intervallbolus, Ramp and Taper, PCA, TCI, Initialbolus, TIVA, Programmmodus (bis zu 12 Schritte), Dose over Time, Take over Mode	
Bedienung		
Bedienoberfläche	Einheitliche Bedienoberfläche aller Infusionspumpen der Space-Generation	
Display	Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung	
Tastatur	Hintergrundbeleuchtung, 10 Tasten zur schnellen und intuitiven Bedienung	Hintergrundbeleuchtung, 11 Tasten zur schnellen und intuitiven Bedienung


Perfusor® Space		Infusomat® Space
Sicherheit		
Free-Flow-Schutz	Integrierte Kolbenbremse zur Vermeidung von Free-Flow während des Spritzenwechsels und ungewollter Bolusgaben	Geräte- und im Schlauch integrierte Anti-Free-Flow-Klemme für maximale Sicherheit, wenn die Pumpenklappe geöffnet oder die Infusionsleitung herausgenommen ist
Verschluss-alarmdruck	Einstellbar in 9 Stufen (ca. 0,1 - 1,2 bar) seit SW "N" 12 Stufen	Einstellbar in 9 Stufen (ca. 0,3 - 1,2 bar) seit SW "N" 12 Stufen
Bolusabbau	Automatischer Bolusabbau nach Okklusionsalarm	
Upstream-Druckerkennung		Upstream-Drucksensor zur Erkennung einer geschlossenen Rollenklammer bei Verwendung ohne Tropfsensor
Tropfsensor		Wahlweise Betrieb mit oder ohne Tropfsensor
Data Lock	Data Lock in 3 Sicherheitsstufen (Einmalartikel optional verschließbar)	
Alarmanzeigen	Optische Alarmanzeige mit Klartext im Display und über LED Zweikanaliger akustischer Alarm für maximale Sicherheit	
Alarmer	Spritze leer, Erinnerungsalarm, Druck zu hoch, Akku leer, Standby, Spritzenbügel offen, Spritze nicht richtig fixiert, technischer Alarm etc.	Okklusionsalarm, Upstream-Alarm, Tropfenalarm, Luftalarm, KVO-Alarm, Erinnerungsalarm, Alarm „Akku leer“, Alarm „Infusionsleitung nicht richtig eingelegt“, technischer Alarm etc.
Voralarme	Spritze fast leer, 3 min vor Erreichen des vorgewählten Volumens, Akku fast leer	Voralarme für Volumenvorwahl und Zeitvorwahl kurz vor Erreichen des vorgewählten Volumens/der vorgewählten Zeit, Akku-Voralarm
Spannungsversorgung		
Stromversorgung	Über B. Braun SpaceStation oder optionales Netzteil (Nennspannung 100 ... 240 V AC~, 50/60 Hz) für Einzelbetrieb	
Externe Kleinspannung	11 ... 16 V DC= ; mit externem 12 V-Steckernetzteil oder mit SpaceStation	
Akkutyp	Wiederaufladbarer NiMH-Akkupack, schnell und leicht austauschbar, ohne die Pumpe zu öffnen	
Akkulaufzeit	Auf Abfrage im Display in h und min	
Wieder-aufladung	Integriertes Ladesystem lädt Akkus, während die Infusionspumpe an externe Kleinspannung angeschlossen ist; Ladezeit ca. 6 h (externes Ladegerät als Zubehörteil vorhanden)	

Technische Daten


Space SmartBattery Packs

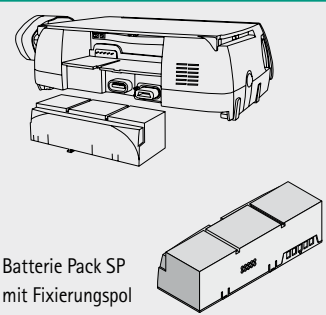Gerätetyp	SmartBattery Pack für Infusomat® Space, Perfusor® Space, SpaceCom und SpaceCover Comfort	 Batterie Pack SP mit Fixierungspol
Handhabung	Einfaches werkzeugfreies Wechseln durch Öffnen des Batteriedeckels	
Zellen	4 x 1,8 Ah NiMH Zellen	
Status	Visualisierung des aktuellen Status als Icon  im Hauptbild (" $> 10\%$ ", " $> 50\%$ " oder " $> 80\%$ " der Batteriekapazität)	
Aufladedauer	Ca. 3 Std für 80 % der Betriebsdauer Ca. 6 Std für 100 % Kapazität	


Space Netzteil und Space Stativklemme

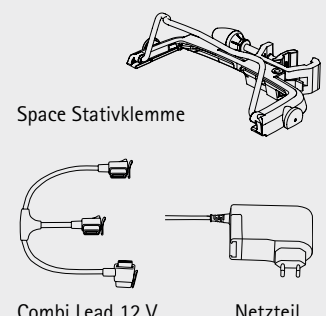Gerätetyp	Spannungsversorgung Space Infusionspumpen	 Space Stativklemme Combi Lead 12 V Netzteil
Befestigung	Die Stativklemme kann an vertikale Stangensysteme (Durchmesser 16-40 mm) sowie an horizontale Normschienen laut EN1789 angefügt werden	
Feuchtigkeitsschutz	Netzteil: spritzwassergeschützt, IP42	
Externe Kleinspannung	100-240 V AC $\pm 10\%$ = 90-264 V AC, 50/60 Hz	
Kabellänge	2 m oder 3 m	
Zubehör	8713133 Combi Lead 12 V – Spannungsversorgung von bis zu 3 Space Infusionspumpen mit einem Netzteil	



Rettungsdienst (Land, Wasser, Luft)

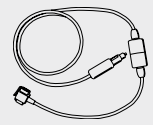Gerätetyp	12 V Steckernetzteil für Spannungsversorgung	 On-board 12 V Gerät
Zertifikate für Pumpen, inkl. Zubehör	EN 1789 Typ B: Notfallkrankswagen EN 1789 Typ C: Intensivtransportwagen EN 13718-1: Wasser-, Luft- und Geländesaniätswagen	
Stromverbrauch	Max. 20 W für 3 Infusionspumpen	

SpaceStation, SpaceCover Standard, SpaceCover Comfort

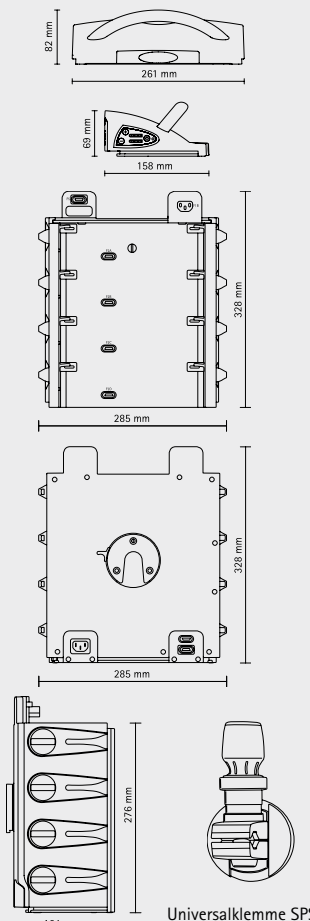Gerätetyp	Stapelbares Ordnungssystem (SpaceStation) für die Aufnahme von bis zu 4 Infusomat® Space oder Perfusor® Space SpaceCover Standard als Abschluss für die oberste SpaceStation SpaceCover Comfort zusätzlich mit einer optischen und akustischen Statusinformation. Zentral einstellbare Lautstärke des Alarmsignals	
Gewicht	SpaceCover Comfort: 0,9 kg SpaceCover Standard: 0,6 kg SpaceStation: 3,6 kg SpaceStation mit SpaceCom: 4,1 kg	
Aufbau	Werkzeugfreie Montage von bis zu 6 SpaceStations (max. 24 Infusionspumpen) in 1, 2 oder 3 Säulen	
Befestigung	Universalklemme zur Befestigung an Stangensystemen (Durchmesser 16-40 mm) sowie an horizontalen Normschienen laut EN1789	
Feuchtigkeitsschutz	IP22	
Spannungsversorgung	Primär: 100-120 V AC ~ 50/60 Hz; 200-240 V AC ~ 50/60 Hz; 110 V 0,6 A/220 V 0,3 A; Sekundär: 12 V DC/35 W	
Batterielaufzeit	SpaceCover Comfort: ~ 26 Std. SpaceCom ohne WLAN: ~ 3 Std. SpaceCom mit WLAN: ~ 2 Std.	
Betriebstemperatur	+10° C ... +40° C +50° F +105° F	

PCA

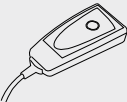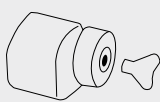Space PCA Kit	PCA-Patiententaster für Infusomat® Space und Perfusor® Space mit Zubehör	
Space PCA Spritzen-sicherung	Schützende Kappe, um Spritzenmanipulation vorzubeugen	
PCA Lockbox	Spezielle Verschlussbox für einen Perfusor® Space z.B. im Rahmen einer PCA Therapie	


PCA Taster

Spritzen-sicherung

Technische Daten


SpaceStation MRI

Gerätetyp	MR-taugliches Ordnungs- und Transportsystem zur Aufnahme von bis zu 4 Space Infusionspumpen
Magnetische Flussdichte	$\geq 20 \text{ mT} = 200 \text{ G}$ Vektorielle Vermessung der Feldkomponenten in 3 Achsen (online)
Elektromagnetische Verträglichkeit	IEC EN 60601-1-2:2001 IEC EN 60601-2-24:1998
Spannungsversorgung	Primär: 100-120 V AC / 200-240 V AC; max 80 VA
Feuchtigkeitsschutz	IP22

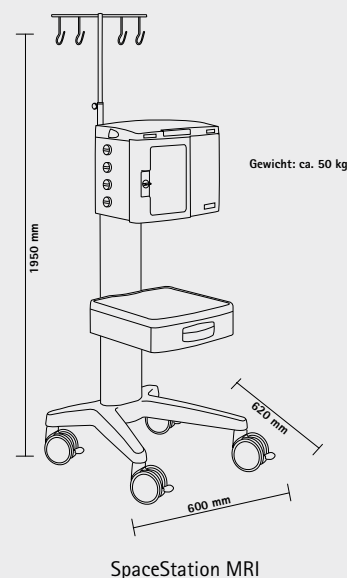


Zubehör

Artikel-Nr.	Verbindungskabel 60 cm:	8713210
	Verbindungskabel 120 cm:	8713215
	Verbindungskabel 10 m:	8713315
	Verbindungskabel 15 m:	8713415

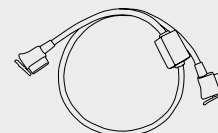


Space OnlineSuite

Artikel-Nr.	Space OnlineSuite	
	OnlineSuite OneView Lizenz	876103
	OnlineSuite Upload Manager	
	.WEB Lizenz	876105
	OnlineSuite DoseTrac Lizenz	876106
	OnlineSuite DeviceManager Lizenz	876108

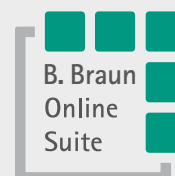

Space GlucoseControl (SGC)

SpaceControl und SGC-Modul	Entscheidungsunterstützungssystem für die Insulintherapie		
Artikel-Nr.	SpaceControl:	8713090	
	SGC-Modul:	8713584	

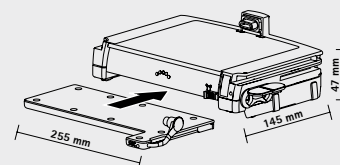

Bestelldaten

Hauptkomponenten	Kurzbeschreibung	Art.-Nr.
Perfusor® Space	Spritzenpumpe für intravenöse und intraarterielle Infusionen sowie für die enterale Ernährung	8713030
Infusomat® Space	Volumetrische Pumpe für Infusomat® Space-Leitung Für intravenöse und intraarterielle Infusionen sowie für die enterale Ernährung	8713050
B. Braun SpaceStation	Ordnungssystem für bis zu 4 Space Infusionspumpen inkl. Universalklemme	8713140
B. Braun SpaceCover Comfort	Abdeckung zum Aufsetzen auf die obere SpaceStation Mit integriertem Griff und zentraler Lautstärkenregelung und Alarm-LED's	8713145
B. Braun SpaceCover Standard	Abdeckung zum Aufsetzen auf die obere SpaceStation, mit integriertem Tragegriff	8713147
B. Braun SpaceStationCom	B. Braun SpaceStation mit integriertem B. Braun SpaceCom. Datenkommunikations-Interface integriert in einer SpaceStation Ermöglicht Datenkommunikations-Protokolle für bis zu 24 Pumpen Schnittstellen: Ethernet, RS 232, USB für Barcode-Leser, Wireless LAN (optional)	8713142
B. Braun SpaceCom	Datenkommunikations-Interface zum optionalen Einbau in eine SpaceStation Ermöglicht Datenkommunikations-Protokoll für bis zu 24 Pumpen Schnittstellen: Ethernet, RS 232, USB für Barcode-Leser, Wireless LAN (optional)	8713160
Space OnlineSuite	Bietet eine Reihe von Anwendungen, die die Prozesse um die Infusionstherapie verbessern, wie z. B. Medikamentendatenmanagement, Alarmmanagement, Upload- und Gerätemanagement	-
SpaceStation MRI	Abgeschirmte SpaceStation inklusive Transportwagen für den Einsatz von bis zu vier Space Infusionspumpen in einer MR-Umgebung	8713152
PCA Kit SP	PCA Taster inklusive Befestigungshaken und Armband, anschließbar an Infusomat®/Perfusor® Space und SpaceStation zur Anforderung von Boli im Rahmen einer PCA Schlüssel zum Verriegeln der PCA Spritzenverriegelung SP und des Spritzenbügels	8713554
PCA Spritzenverriegelung SP	Spritzenverriegelung des Antriebskopfs zum Schutz der 50 ml Spritze vor unberechtigt Zugriff	8713556
PCA Lockbox	Spezielle Verschlussbox für einen Perfusor® Space z.B. im Rahmen einer PCA Therapie	8713557
Steckernetzteil SP	Steckernetzteil für 1 Infusionspumpe bei Einzelpumpenbetrieb	8713110D
Pole Clamp SP	Stativklemme mit integriertem Griff für den Transport von bis zu 3 Pumpen Drehvorrichtung für vertikale und horizontale Pumpenanbringung an Infusionsständern und Wandschienensystemen	8713130
Kurzstativ SP	Stativ für Infusomat® Space; zur Anbringung an PoleClamp SP	8713135
Akkupack SP (NiMH)	Wiederaufladbarer Akkupack für Infusomat®/Perfusor® Space, SpaceCover Comfort und SpaceStationCom	8713180A
Tropfsensor SP	Optionaler Tropfsensor für Infusomat® Space	8713175
Verbindungskabel SP (60 cm)	Kabel zur Verbindung mehrerer SpaceStations, wenn diese in Säulen nebeneinander angebracht werden Länge: 60 cm	8713210
Verbindungskabel SP (120 cm)	Kabel zur Verbindung mehrerer SpaceStations, wenn diese in Säulen nebeneinander angebracht werden Länge: 120 cm	8713215
Schnittstellenkabel CAN SP	Schnittstellenkabel zur Verbindung mit einem PC	8713230
Anschlussleitung SP (12 V)	Verbindung für 12V-Anschluss	8713231
Kombi-Kabel SP (12 V)	Kabel zur Verbindung von bis zu 3 Pumpen (12V-Anschluss)	8713133
Anschlussleitung für Personalruf SP	Verbindung zur Personalrufanlage	8713232

Kennen Sie schon unsere Akutdialysemaschine OMNI?



Scannen Sie den QR-Code
für weitere Informationen:



B. Braun Deutschland GmbH & Co. KG | Tel. (0 56 61) 9147-70 00 | E-Mail: info.de@bbraun.com | www.bbraun.de
Betriebsstätte: Melsungen | Carl-Braun-Straße 1 | 34212 Melsungen